

Der Osmotex Sterilisator®-Mechanismus (3-Wege-Inaktivierung)

Im Gegensatz zu Standard Schutzmasken desinfiziert sich die Osmotex Active Sterilizing Facemask® kontinuierlich durch ihre aktive Membrantechnologie selbst.

Die Maske bietet einen dreifachen Schutz:

1. Partikelfilterung: die Maske enthält einen Filter der Klasse FFP2/N95
2. Passive Desinfektion: Polarisierte Elektrodenoberflächen, die bis zu 99% Inaktivierung von Viren und Bakterien bieten
3. Aktive (elektronisch gesteuerte) Desinfektion, die zu einer Inaktivierung von bis zu > 99,9% von Viren und Bakterien führt

Die Osmotex Active Sterilizing Facemask® wird mit einer wiederaufladbaren Elektronikeinheit (SC-10) und einem Ladekabel geliefert.

1. Laden Sie die Elektronikeinheit auf

Nach dem Öffnen der Verpackung schließen Sie bitte das USB-Ladekabel an die SC-10 Elektronikeinheit und an ein handelsübliches USB-Ladegerät an. Eine rote Ladeanzeige leuchtet auf. Wenn sie vollständig aufgeladen ist, erlischt die rote Anzeige. Mit einer vollen Ladung kann die Maske normalerweise 10 Stunden lang aktiv desinfizieren.

2. Verbinden Sie die Elektronikeinheit mit der Maske

Bitte verbinden Sie die SC-10 Elektronikeinheit an den entsprechenden Druckknöpfen an der Seite der Maske. Richten Sie die entsprechenden Druckknöpfe aus und drücken Sie die Maske und die Elektronikeinheit fest zusammen.

Drücken Sie die EIN-Taste an der SC-10-Elektronikeinheit, bis das grüne Licht leuchtet.

3. Lassen Sie die erste aktive Desinfektion ablaufen

Wenn die SC-10 Elektronikeinheit angeschlossen und eingeschaltet ist, findet automatisch die erste Desinfektion statt.

4. Legen Sie die Maske an

Halten Sie die Maske (mit oder ohne Elektronikeinheit) an Ihre Wangen, so dass sie Nase und Mund bedeckt. Passen Sie die Form des Nasenclips mit Ihren Händen an.


Fixieren Sie die Maske, indem Sie die Gummibänder hinter Ihren Ohren anbringen. Die Länge der Gummibänder kann mit Hilfe der Stopper eingestellt werden. Vergewissern Sie sich, dass die Maske fest und dicht sitzt und am Rand abschließt.

5. Ein- und Ausschalten der aktiven Desinfektion während des Tragens der Maske

So schalten Sie die Elektronikeinheit ein: Drücken Sie die Ein/Aus-Taste an der SC-10-Elektronikeinheit 1 Sekunde lang, um die aktive Desinfektion einzuschalten.

Die aktive Desinfektion ist eingeschaltet, wenn das grüne Licht leuchtet.

Um die Elektronikeinheit auszuschalten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang, bis das grüne Licht erlischt.

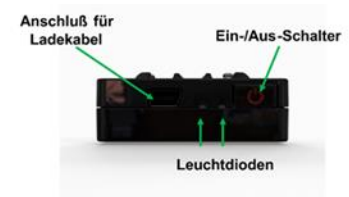

6. Pflege und Reinigung der Maske



Nehmen Sie vor dem Waschen der Maske immer die Elektronikeinheit ab!



Bügeln Sie die Maske nicht!



Die Maske kann bei ca. 30° C schonend von Hand gewaschen werden. Bitte knicken oder verdrehen Sie das Maskenmaterial nicht. Die Elektronikeinheit und das Ladekabel können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

Nach dem Waschen kann die Maske direkt wieder getragen werden, auch wenn sie noch feucht ist.

Eine vollständige Gebrauchsanweisung finden Sie hier:



<https://osmotex.ch/osmotex-steriliser-ifu/>