

Guide rapide pour Osmotex Active Sterilising Facemask®.

Le mécanisme Osmotex Steriliser® (inactivation à 3 voies)

Contrairement aux masques de protection passive, le Osmotex Active Sterilising Facemask® se désinfecte en permanence grâce à sa technologie de membrane active.

Le masque offre une triple protection :

1. Filtration des particules : le masque est doté d'un filtre de qualité FFP2/N95.
2. Désinfection passive : des surfaces d'électrodes polarisées permettent une inactivation des virus et des bactéries jusqu'à 99 %.
3. Désinfection active (pilotée électroniquement), qui permet une inactivation des virus et des bactéries jusqu'à > 99.99 %.

Le masque facial stérilisant actif Osmotex® est livré avec une unité électronique rechargeable (SC-10) et un câble de chargement.

1. Chargez l'unité électronique

Dès l'ouverture de l'emballage, veuillez connecter le câble de charge USB à l'unité électronique SC-10 et à un chargeur USB standard. Un témoin de charge rouge s'allume. Lorsque la charge est complète, le voyant rouge s'éteint. Avec une charge complète, le masque peut généralement être désinfecté activement pendant au moins 10 heures.

2. Connectez l'unité électronique au masque

Connectez l'unité électronique SC-10 aux boutons correspondants sur le côté du masque. Alignez les bouton-pression correspondants et pressez fermement le masque et l'unité électronique l'un contre l'autre.

Appuyez sur le bouton ON de l'unité électronique SC-10 jusqu'à ce que le voyant vert s'allume.

3. Laissez la première désinfection active se dérouler

Lorsque l'unité électronique SC-10 est connectée et allumée, la première désinfection a lieu automatiquement.

4. Portez votre masque

Tenez le masque (avec ou sans l'unité électronique) contre vôtres joues de manière qu'il couvre le nez et la bouche. Ajustez la forme du pince-nez avec vos mains.


Fixez le masque en appliquant les bandes élastiques derrière vos oreilles. La longueur des bandes élastiques peut être ajustée à l'aide des bouchons. Veillez à ce que le masque soit bien fixé et étanche le long de son bord.

5. Activation et désactivation de la désinfection active pendant le port du masque

Pour allumer l'unité électronique : Appuyez sur le bouton marche/arrêt de l'unité électronique SC-10 pendant 1 seconde pour activer la désinfection active.

La désinfection active est activée lorsque le voyant vert est allumé.

Pour éteindre l'unité électronique, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant vert s'éteigne.

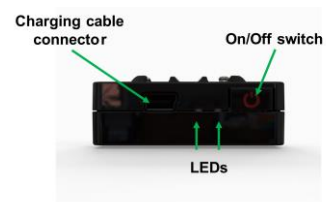

Guide rapide pour Osmotex Active Sterilising Facemask®.

6. Entretien et nettoyage du masque



Retirez toujours l'unité électronique avant de laver le masque !



Ne repassez pas le masque !



Le masque peut être lavé délicatement à la main (sans savon) à environ 30 °C. Veuillez ne pas plier ou tordre le matériau du masque. L'unité électronique et le câble de chargement peuvent être essuyés avec un chiffon humide.

Après le lavage, le masque peut être porté à nouveau directement, même s'il est encore humide.

Pour un mode d'emploi complet, visitez le site :



<https://osmotex.ch/osmotex-steriliser-ifu/>