

Il meccanismo Osmotex Steriliser® (triplice inattivazione)

A differenza delle maschere protettive passive, l'Osmotex Active Sterilising Facemask® si disinfetta continuamente grazie alla sua tecnologia a membrana attiva.

La maschera offre una triplice protezione:

1. Filtrazione delle particelle: Incorpora un filtro di grado FFP2/N95
2. Disinfezione passiva: Superfici elettrodeiche polarizzate, che forniscono fino al 99 % di inattivazione di virus e batteri
3. Disinfezione attiva (guidata elettronicamente), che si traduce in un'inattivazione fino al > 99,9 % di virus e batteri

L'Osmotex Active Sterilising Facemask® viene fornito con un'unità elettronica ricaricabile (SC-10) e un cavo di ricarica.

1. Caricare l'unità elettronica

All'apertura della confezione, collegare il cavo di ricarica USB all'unità elettronica SC-10 e a un caricatore USB standard. Un indicatore rosso di carica si accenderà. Quando è completamente carica, la luce rossa si spegne. Con una carica completa, la maschera può tipicamente disinfettare attivamente per almeno 10 ore.

2. Collegare l'unità elettronica alla maschera

Collegare l'unità elettronica SC-10 ai pulsanti corrispondenti sul lato della maschera. Allineare i bottoni a pressione e premere saldamente insieme la maschera e l'unità elettronica.

Premere il pulsante ON sull'unità elettronica SC-10 fino a quando la luce verde si accende.

3. Lasciare che la prima disinfezione attiva abbia luogo

Quando l'unità elettronica SC-10 è collegata e accesa, la prima disinfezione avrà luogo automaticamente.

4. Indossare la maschera

Tenere la maschera (con o senza l'unità elettronica) contro le guance in modo che copra naso e bocca. Regolare la forma della clip del naso con le mani.


Fissare la maschera applicando gli elastici dietro le orecchie. La lunghezza degli elastici può essere regolata tramite i tappi. Assicurarsi che la maschera sia ben ferma e aderente, sigillando lungo il suo bordo.

5. Accensione e spegnimento della disinfezione attiva mentre si indossa la maschera

Per accendere l'unità elettronica: Premere il pulsante on/off sull'unità elettronica SC-10 per 1 secondo per attivare la disinfezione attiva.

La disinfezione attiva è attiva quando la luce verde è accesa.

Per spegnere l'unità elettronica, premere il pulsante on/off per due secondi finché la luce verde non si spegne.

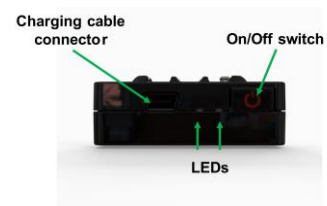

6. Cura e pulizia della maschera



Rimuovere sempre l'unità elettronica prima di lavare la maschera!



Non stirare la maschera!



La maschera può essere lavata delicatamente a mano a circa 30°C. Si prega di non piegare o torcere il materiale della maschera. L'unità elettronica e il cavo di ricarica possono essere puliti con un panno umido.

Dopo il lavaggio, la maschera può essere indossata di nuovo direttamente, anche se ancora umida.

Per le istruzioni complete per l'uso visitare il sito:



<https://osmotex.ch/osmotex-steriliser-ifu/>